



Care & Protections

by Classic LINE

PRODUKTDATENBLATT

SEITE 1

Filtrierende FFP2 NR **PREMIUM** Atemschutz-Maske

Modell EYTV139110051-17

EN 149:2001+A1:2009

Schutzstufe: FFP2 NR ohne Ventil



Hauptmerkmale

Diese **PREMIUM Atemschutz-Maske** bietet dem Anwender einen höchst effektiven Schutz vor Feinstaubpartikeln in der Industrie und dem Gesundheitswesen:


- Geprüft gemäß EN 149:2001+A1:2009
- Angenehm zu tragen dank optimaler Passform
- 4-lagiger Aufbau inklusive patentierter **PTFE Nano-Filtermembran**
- ausgezeichnete Filterleistung
- sehr geringer Atemwiderstand
- Flexible Ohrenschlaufen und Nasenbügel ermöglichen einfache Anpassung an Kopf und Gesicht

Materialien / Aufbau

PTFE Nano
Filter Membran

Patent:
2013107202137
2016102967348

DONGMENG

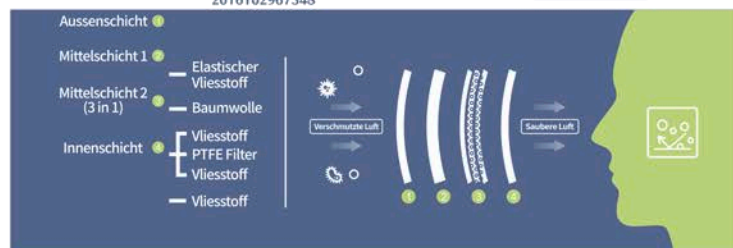

Ein möglicher Geruch der Masken nach öffnen der Verpackung ist normal und unbedenklich. Dieser verfliegt nach wenigen Minuten.

Normen

Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009, filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln. Zu den Leistungsprüfungen dieser Norm gehören z.B. Entflammbarkeit, Atemwiderstand und der Filterdurchlass. Die aktuelle Fassung der Norm kann über Ihre nationale Normungsbehörde bezogen werden. Zusätzlich wurden die Produkte der Belastungsprüfung nach EN 1327 4-7 (Prüfverfahren mit Paraffinöl) unterzogen und erfüllen die entsprechenden Anforderungen der EN 149:2001+A1:2009. Die Maske entspricht der PSA-Verordnung EU 2016/425 und ist CE zertifiziert.

Zulassung

Die Maske entspricht DIN EN 149:2001+A1:2009 und der PSA-Verordnung EU 2016/425 und ist CE zertifiziert. Die Zertifizierung erfolgte durch das Prüfinstitut SGS FIMKO OY, als benannte Stelle (NB) mit der Kennnummer 0598.

Anwendung

Die **PREMIUM Atemschutz-Maske** ist in vielen Arbeitsbereichen einsetzbar, in denen ein zuverlässiger Schutz vor Feinstaubpartikeln und/oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln sowie Aerosolen benötigt wird. Sie ist für den Einsatz bei festen und nicht flüchtigen flüssigen Partikeln bis zu einer Konzentration des 10-fachen Grenzwertes geeignet.

Die Wirksamkeit ist nur dann gegeben, wenn die Maske dem Zweck entsprechend gewählt wird. Sie muss korrekt an die Gesichtsform angepasst und über die gesamte Dauer getragen werden, in welcher der Träger der Schadstoffbelastung ausgesetzt ist.

Anwendungsbeispiele

Die nachfolgende Übersicht dient lediglich als Auswahlhilfe für typische Anwendungsbereiche und darf nicht als alleinige Grundlage für die richtige Wahl der Schutzausrüstung herangezogen werden:

- Bohr-, Steinbruch-, Abriss-, und Siloarbeiten
- Holzverarbeitung
- Schleifen/Fräsen
- Verarbeitung künstlicher Mineralfasern (KMF) und Spritzbeton
- Landwirtschaftliche Tätigkeiten
- Reinigungsarbeiten
- Schädlingsbekämpfung (Wasserbasis)
- Geräte- und Anlagenwartung
- Pandemievorsorge

Die Auswahl der geeigneten Schutzausrüstung (PSA) hängt vom spezifischen Anwendungsbereich ab und darf nur von sachkundigen Personen erfolgen. Diese Personen müssen mit den Risiken, Arbeitsbedingungen und Beschränkungen der PSA vertraut sein.

Lagerung

Bitte unbedingt das Haltbarkeitsdatum auf der Produktverpackung beachten. Die Lagerung sollte sauber und trocken, in einem Temperaturbereich von -30 °C bis + 50 °C und einer max. Luftfeuchtigkeit von 80%, erfolgen.

Entsorgung

Gebrauchte **PREMIUM Atemschutz-Masken** bitte gemäß den regionalen Vorschriften entsorgen und, bei der Benutzung zur Pandemievorsorge, ggf. die gesonderten Hygienevorschriften beachten.




PRODUKTDATENBLATT

Filtrierende FFP2 NR **PREMIUM** Atemschutz-Maske



Anlegen der **PREMIUM** Atemschutz-Maske

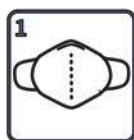

1. Entnehmen Sie die Maske mit gereinigten Händen aus der Verpackung und prüfen Sie diese auf mögliche Risse oder Beschädigungen. Wenn Sie Beschädigungen der Maske feststellen, verwenden Sie diese nicht mehr, entsorgen diese und nutzen eine neue Maske.



2. Nehmen Sie die beiden Haltebänder in die Hände und platzieren die Maske, mit dem Nasenbügel nach oben, auf Kinn und Nase.



3. Ziehen Sie nun die Haltebänder über die Ohren.



4. Passen Sie mit beiden Händen den Nasenbügel an Ihren Nasenrücken an, bis die Maske bequem sitzt und abdichtet. Wenn Sie die Anpassung nur mit einer Hand vornehmen, könnte die Leistung der Maske weniger wirkungsvoll sein.

Dichtsitz überprüfen

Der Gefahrenbereich darf unter keinen Umständen betreten werden, wenn die Maske nicht dicht genug sitzt.

So wird der Dichtsitz, nach Anlegen der Maske, geprüft:

1. Umschließen Sie den Maskenkörper mit beiden Händen und achten darauf, dass diese nicht verrutscht.
2. Atmen Sie tief AUS.
3. Bei Luftaustritt an den Rändern der Maske, bitte den korrekten Sitz im Wangenbereich erneut prüfen.
4. Wenn Luft aus dem oberen Nasenbereich der Maske austritt, muss der Nasenbügel stärker angedrückt werden.

Den Gefahrenbereich nur betreten, wenn der Dichtsitz ordnungsgemäß geprüft wurde und keine Luft an den Rändern und dem Nasenbereich festzustellen ist.

Die **PREMIUM Atemschutz-Maske** ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Verunreinigungen, Feuchtigkeit oder ungenügendem Dichtsitz bitte unbedingt durch eine neue Maske ersetzen und den Dichtsitz erneut prüfen. Bei Missachtung der Anweisungen oder falscher Anwendung kann die Wirksamkeit der Maske reduziert werden und dauerhafte gesundheitliche Schäden und/oder Erkrankungen zur Folge haben.

Warnhinweise

Die Atemschutzmaske muss folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Für die Anwendung geeignet sein.
- Korrekt sitzen.
- Während der gesamten Dauer der Schadstoffbelastung getragen werden.
- Bei Bedarf ausgetauscht werden.

Wenn die Gebrauchshinweise für die Atemschutzmasken nicht ordnungsgemäß befolgt werden und das Produkt nicht während der gesamten Zeit der Schadstoffbelastung getragen wird, kann dies für den Anwender dauerhafte gesundheitsschädliche Schäden bis hin zur Invalidität zur Folge haben. Richten Sie sich in Bezug auf Eignung und sachgemäße Nutzung der Atemschutzmasken nach den geltenden örtlichen Vorschriften und nach den Herstellerhinweisen. Der Anwender muss vor der Nutzung entsprechend den geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in der korrekten richtigen Anwendung des Produktes geschult werden. Die **PREMIUM Atemschutz-Maske** schützt den Anwender nicht vor Gasen und Dämpfen. Das Produkt nicht in Umgebungen einsetzen, die weniger als 19,5% Sauerstoff enthalten. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn die Schadstoffkonzentration eine unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit darstellt. Gesichtshaare im Maskenbereich können den Sitz der Maske beeinträchtigen und den Dichtsitz negativ beeinflussen.

Verlassen Sie den Gefahrenbereich sofort, wenn:

- a) sich Atembeschwerden einstellen
 - b) Schwindelgefühle oder andere Beschwerden auftreten.
- Sollten Beschädigungen an der Maske entdeckt werden oder sich ein hoher Atemwiderstand einstellen, so ist die Maske auszuwechseln und fachgerecht zu entsorgen. Eine Veränderung, Modifikation oder Reparatur der Maske ist nicht gestattet. Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Hersteller:

Zhejiang Dongmeng Medical Equipment Co., Ltd.
Dongmeng Industrial Area Wuniu, Yongjia,
325000 Wenzhou, Zhejiang, China

Importeur:

Classic Line Warenhandels GmbH
Koelner Str. 110 C • DE-58285 Gevelsberg

Geprüfte CE-Qualität nach der Norm: EN 149: 2001 + A1: 2009
Haltbarkeit: 24 Monate nach Produktionsdatum

Ref-No.: 0366-180

Charge/Lot: siehe Verpackungsaufdruck

Model-No.: EYTV139110051-17



Temperaturbereich
der Lagerung



Max. Luftfeuchtigkeit
der Lagerung



nicht
wiederverwendbar



Care & Protections

by Classic Line



SEITE 3

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Filtrierende FFP2 NR **PREMIUM** Atemschutz-Maske

EU-Konformitätserklärung

Die Firma

Classic Line Warenhandelsgesellschaft mbH

Koelner Strasse 110c
58285 Gevelsberg, Deutschland

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 (Ref. 0366-180)

DONGMENG FFP2 NR, weiss, PSA Kategorie III

Model EYTV139110051-17

mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung FI21/968304

ausgestellt von der notifizierten Stelle NB0598

SGS FIMKO OY

Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland

und mit der Harmonisierungsrechtsvorschrift der europäischen Union
unter Anwendung der Norm EN149_2001+A1:2009 übereinstimmt.

Gemäß Artikel 18 und 19 und Anhang I wird das Produkt der Kategorie III zugeordnet und ist identisch mit der PSA zur EU-Baumusterprüfung (Modul B), die Gegenstand der ausgestellten und hier aufgeführten EU-Baumusterprüfbescheinigung ist.

Die PSA unterliegt dem Verfahren nach Anhang VII (Modul C2) der Verordnung EU 2016/425 unter Aufsicht und Kontrolle der hier aufgeführten Stelle

SGS FIMKO OY – European Notified Body 0598

Für die Benutzung und Verwendung des vorgenannten Produktes machen wir ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Gebrauchshinweise und die jeweils zutreffenden Anwendungs- und Sicherheitsvorschriften unbedingt einzuhalten sind. Für den nicht bestimmungsgemäßen und/oder bestimmungswidrigen Gebrauch trägt allein der Verwender die Verantwortung.

Im Sinne des Konformitätsnachweises sind in unseren Betriebsräumen sämtliche relevanten Unterlagen, die für die Erstellung dieser EU-Konformitätserklärung notwendig sind, abgelegt und für die behördlichen Stellen vorlegbar.

Diese EU-Konformitätserklärung ist bis zum 22.02.2026 gültig

Gevelsberg, den 22.02.2021



Daniel Schumacher // Senior Sales Manager



Care & Protections

by Classic Line

DECLARATION OF CONFORMITY

Filtrierende FFP2 NR **PREMIUM** Atemschutz-Maske



SEITE 4

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This Declaration of Conformity, issued under the sole responsibility of the manufacturer

ZHEJIANG DONGMENG MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD. Dongmeng Industrial Area, Wuniu,
Yongjia, Wenzhou, Zhejiang, China

declaring the following Personal Protective Equipment (PPE)

Product Description: Dongmeng PTFE Filtering Half Masks FFP2 NR for use by Healthcare professionals.

Product Models: EYTV139110051-17

is/are in conformity with the provisions of the following European Regulation

PPE (Personal Protective Equipment) Regulation

on the basis that SGS carried out the relevant Type Examination procedures under the requirements with the Regulation(EU)2016/425 of the European Parliament and Council relating to Personal Protective Equipment Regulation(PPE)Annex V(Module B) and meets the relevant health and safety requirements specified in Annex II

SGS Fimko Oy

Takomote 8 F-00380 Helsinki, Finland Notfed Body No.0598

performed the EU type-examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate.

The PPE is subject to the conformity assessment procedure under surveillance of the notified body SGS Fimko Oy, Notified Body No.0598.

Signed by: Chi Huijie

Legal Representative of Zhejiang Dongmeng Medical Equipment Co., Ltd.

Date: 27 Oct. 2020





FFP1	FFP2	FFP3
Feinstaub, Rauch und wasser- bzw. ölbasierende Aerosole	Gesundheitsschädliche und krebserregende Stäube sowie wasser- bzw. ölbasierende Aerosole	Gesundheitsschädliche und krebserregende Stäube sowie wasser- bzw. ölbasierende Aerosole
Grenzwert der Schadstoffbelastung: max. 4-fache des Arbeitsplatzgrenzwerts	Grenzwert der Schadstoffbelastung: max. 10-fache des Arbeitsplatzgrenzwerts	Grenzwert der Schadstoffbelastung: max. 30-fache des Arbeitsplatzgrenzwerts
Schutz vor ungiftigen sowie nicht-fibrogenen Stäuben	Schutz vor giftigen Stäuben (z.B. Silikon, Beton, Natrium)	Schutz vor giftigen Stäuben sowie Rauch und Aerosolen
Anwendungsbeispiele: Schleifen und Bohren (Holz, Eisen, Stein, Rost) Reinigungsarbeiten im Haushalt (Hausstaub) Pollenallergie	Anwendungsbeispiele: Schleifen und Bohren (Farben, Lacke, Kunststoff) Schweißarbeiten Aufenthalt in mit Schimmel, Bakterien oder Viren der Risikogruppe 2 belasteten Arbeitsbereichen (Reinigung, Pflege, etc.)	Anwendungsbeispiele: Schleifen und Bohren (legierter Stahl) Arbeiten mit Asbest oder Ruß Umgang mit Bakterien und Viren der Risikogruppe 3

HINWEIS: Bei den genannten Tätigkeiten handelt es sich um Beispiele. Eine fachgemäße und der Gefährdungsbeurteilung entsprechende Wahl der Schutzausrüstung ist vorausgesetzt. Vor dem Einsatz ist ein Sauerstoffgehalt von min. 19,5% im Gefahrenbereich sicherzustellen. FFP-Masken schützen nicht vor giftigen Gasen oder Dämpfen. Bei Unsicherheit hinsichtlich der Einsatzbedingungen sollte zu umfassender Schutzausrüstung gegriffen werden.